

## HANSAPLAST AMPOLLAS T- GDE 5 UNIDADES



Alivio inmediato del dolor.

Calificación: Sin calificación

**Precio**  
5,30 €

5,30 €

0,48 €

[Haga una pregunta sobre este producto.](#)

Descripción

### **MODO DE EMPLEO**

Limpiar y secar cuidadosamente el area afectada antes de colocar el apósito.

Centrar el apósito sobre la parte lesionada de la piel.

Presionar suavemente sobre los bordes y alisar sin arrugarlo.

Cambiar el apósito solo cuando éste se caiga por si mismo.

Puede ducharse o bañarse con el apósito.

### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.